


# Finale® Radiale Kompressionshilfe

WEITERE INFORMATIONEN SIND IN DEN ANWENDUNGSHINWEISEN ZU FINDEN.

**SCHRITT 1.** Vor der Platzierung des „Finale“, die Stifte mit einer Hand eindrücken und das Rad mit der anderen Hand gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag herausdrehen

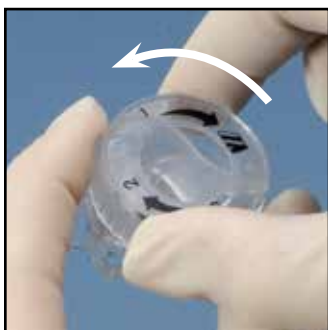

US-Patente und ausländische Patente sind angemeldet.

**SCHRITT 2.** Das „Finale“ am Patientenhandgelenk in Position bringen. Die Kompressionsplatte muss sich mittig über dem arteriellen Zugang befinden. Das Einführbesteck sollte in der Einbuchtung neben der Kompressionsplatte positioniert sein. Das Klettband durch die Schnalle ziehen und unter angemessenem Zug befestigen. Das Armband sollte eng anliegen.

**NICHT ZU FEST ANZIEHEN**



VELCRO® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Velcro Industries B.V.

**SCHRITT 3.** Das Einführbesteck herausziehen und dabei das Rad im Uhrzeigersinn drehen, bis die Hämostase erreicht ist.

Um ein Überdrehen des Gerätes zu vermeiden, Kompression reduzieren, bis eine leichte Blutung auftritt, dann Kompression wieder graduell erhöhen, bis die Blutung aufhört.



**Achtung** – Gerät nicht überdrehen.

Katalognummer	Bandlänge
<b>FCD100</b>	10" (25,4 cm)
<b>FCD200</b>	12" (30,5 cm)

**SCHRITT 4.** Regelmäßig auf Blutung überprüfen. Falls Blutung auftritt, die Kompression durch Drehen im Uhrzeigersinn erhöhen. Die anfängliche Kompression sollte für etwa 30 Minuten aufrechterhalten werden. Bei manchen Patienten kann eine längere anfängliche Kompressionszeit erforderlich sein.

**Hinweis** – Immer die niedrigstmögliche Kompression zur Erreichung der Hämostase wählen.

**Achtung** – Patienten sollten mit aktiviertem Gerät nicht unbeaufsichtigt bleiben.



**SCHRITT 5.** Zur Aufhebung der Kompression, das Gerät alle 15 bis 30 Minuten durch eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn lockern. Zur Reduzierung der Kompression mit der einen Hand die Stifte eindrücken, während die andere Hand das Rad bedient. Bei eingedrückten Stiften das Rad gegen den Uhrzeigersinn auf die gewünschte Kompression einstellen.

**Hinweis** – Falls am Zugang eine Blutung auftritt, Kompression erhöhen, bis die Blutung stoppt.



**SCHRITT 6.** Sobald die Hämostase erreicht ist, Gerät entfernen und entsorgen.



**YOUR PARTNER FOR RADIAL PROCEDURES**

Merit Medical Systems, Inc. • 1600 West Merit Parkway • South Jordan, Utah 84095 • 1-801-253-1600 • 1-800-35-MERIT

Merit Medical EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA (EMEA) • Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport • Niederlande • Tel.: +31 43 358 82 40

Kostenlose Telefonauskunft in bestimmten Ländern: Österreich 0800 295374 • Belgien 0800 729 06 (Niederländisch) 0800 731 72 (Französisch) • Dänemark 80 88 00 24 • Frankreich 0800 91 60 30 • Deutschland 0800 182 08 71 Republik Irland 1800 553 163 • Luxemburg 8002 25 22 • Niederlande 0800 022 8184 • Schweden 020 79 24 45 • Großbritannien 0800 973 115 • Finnland 00800 6374 8633

www.merit.com

401926004/B ID 081513