

BEARING (Несущий) nsPVA
Эмболизационные частицы несферического ПВА
 Этапы подготовки



Извлеките поршень из стандартного шприца 30 мл.



Отверните крышку с флакона и поместите **эмболизационные частицы BEARING nsPVA** в шприц. Установите поршень в шприц.



Наполните шприц **10 мл** контрастного вещества и **10 мл** 0,9% раствора NaCl.



Для получения гомогенной суспензии перед введением аккуратно перемешайте смесь физиологического раствора/контрастного вещества и **эмболизационных частиц BEARING nsPVA** и **подождите 2-3 минуты**.



Соедините шприц 30мл с одним из портов 3-ходового краника. Соедините шприц для инъекций 1мл или 3 мл к другому порту краника.

ПРИМЕЧАНИЕ: При желании катетер может быть подсоединен к оставшемуся порту краника



ПРИМЕЧАНИЕ: Перед введением удалите весь воздух из системы.

Медленно и аккуратно аспирируйте смесь из **эмболизационных частиц BEARING nsPVA** с физиологическим раствором/контрастным веществом для снижения вероятности попадания воздуха в систему.



Под непрерывным рентгеноскопическим контролем медленно введите в катетер смесь **эмболизационных частиц BEARING nsPVA** с физиологическим раствором/контрастным веществом, используя пульсирующее введение и наблюдая за скоростью движения контрастного вещества.

ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии эффекта остановки кровообращения повторите введение, используя дополнительный объем смеси эмболизационных частиц BEARING nsPVA с физиологическим раствором/контрастным веществом. Если после введения ток контраста сохраняется, используйте эмболизационные частицы BEARING nsPVA большего размера. Будьте внимательны при определении конечной точки эмболизации.

ПРИМЕЧАНИЕ: После завершения процедуры удалите катетер, поддерживая небольшое всасывание, чтобы не сместить эмболизационные частицы BEARING nsPVA, по-прежнему находящиеся в просвете катетера.



Merit Medical Systems, Inc.:
 1600 West Merit Parkway • South Jordan, Utah 84095 • 1-801-253-1600 • 1-800-35-MERIT
 Merit Medical EUROPE, THE MIDDLE EAST AND AFRICA (EMEA):
 Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport • The Netherlands • Тел.: +31 43 358 82 22
 Merit Medical Ireland Ltd. • Parkmore Business Park West • Galway, Ireland (Ирландия) • +353 (0) 91 703 733
 Бесплатные номера телефонов для отдельных стран: Австрия 0800 295 374 • Бельгия 0800 72 906 (голландский)
 0800 73 172 (французский) • Дания 80 88 00 24 • Франция 0800 91 60 30 • Финляндия 0800 770 586
 Германия 0800 182 0871 • Ирландская Республика 1800 553 163 • Италия 800 897 005
 Люксембург 8002 25 22 • Нидерланды 0800 022 81 84 • Норвегия 800 11629 • Швеция 020 792 445
 Великобритания 0800 973 115

www.merit.com